

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000


## ダイヤモンド（Stoddard）

### \*【禁忌・禁止】

本品の成分に発疹や皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造 下記の通り

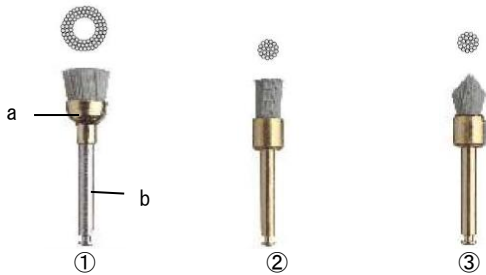

| No. | 型名   | タイプ |
|-----|------|-----|
| ①   | カップ  | CA  |
| ②   | フラット |     |
| ③   | ポイント |     |

#### 2. 原材料

作業部：ダイヤモンド繊維練りこみナイロン  
軸部：①・・・a：真鍮、ニッケル・金コーティング  
b：真鍮、ニッケルコーティング  
②、③・・・真鍮、ニッケル・金コーティング

#### 3. 包装

10 本 / 袋

### 【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認する。  
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
- 2) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 3) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 4) 本品を歯牙及び補綴物に軽く押しつけて研磨する。  
※最大回転数：5,000rpm

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 6) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

- 7) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 8) 使用に際しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- 9) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、本品を確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。

### \*【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は、直ちに用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 5) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は破損、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。  
これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌上の注意  
[洗浄]
  - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
  - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
  - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
  - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。<[滅菌]
  - ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】
  - ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。<[その他]
  - ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
  - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Stoddard Manufacturing Company Limited  
（ストッダード マニファクチャリング社）  
製造国：イギリス