

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN コード：70904000

マジックパール

【禁忌・禁止】

- 下の患者には使用しないこと。
 - 呼吸器疾患のある患者。
 - 病的に深い歯周ポケット（6 mm 以上）、及び粘膜病変のある患者。〔ごく稀に皮下気腫を生じるおそれがある。〕
 - 肝臓障害のある患者。
 - 重篤な消化器官潰瘍のある患者。
 - 心機能障害、肺機能障害のある患者。
 - 口腔内に充血、出血、炎症、その他異常が認められる患者。
 - 口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者。
 - 本品に対してアレルギー体質のある患者。
- 長時間の連続使用は避け、患者には随時うがいをさせること。
- 口腔内の軟組織、歯肉溝に向け直接噴射しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
白色粉末、無香料
- 原材料
炭酸カルシウム
- 包装
300 g / 1 本

【使用目的又は効果】

本品は粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いるものである。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 使用前に本品を軽く 2～3 回振る。
- 本品を電動式歯面清掃用装置等（別売）に補充する。
- 歯面に対し電動式歯面清掃用装置等のノズルを 3～5 mm 離し、10° ～ 60° の角度で噴射して清掃する。バキューム（別売）を使用し、口腔内に溜まったパウダーの溶液を吸引する。
- 使用後は速やかにうがい等で口腔内を水洗する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 均一にするため、使用前にボトルを必ず振ること。
- 本品を使用する場合は、バキュームを行うこと。
- 電動式歯面清掃用装置等は、装置メーカーの指示に従って使用すること。
- 使用後は本品のボトルの蓋をしっかりと閉めること。開封されたまま長時間経過した本品は使用しないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 歯根セメント、脱灰エナメル質、充填物、補綴物・充填物のマージン及びクラウン等には直接噴射しないこと。
- 万一、目に本品が入った場合は、すぐに大量の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 本品が口腔以外の粘膜部分（目、鼻等）に入らないようにすること。
- 患者と医師は目の保護をすること。コンタクトレンズを装着している患者には特段の注意を払うこと。
- 医師はマスクとグローブの着用をすること。
- 患者の唇にワセリン等を塗り、口角の乾燥またはひび割れを防ぐこと。
- 本品を飲み込んだ場合には水で洗浄し、大量の水を飲むこと。気分がすぐれない場合は、医師の診断を受けること。
- 吸い込んだ場合は新鮮な空気を吸うこと。気分がすぐれない場合は医師の診断を受けること。

- 本品の使用により、アレルギー症状が発現した患者には使用を中止し、医師の診断を受けること。

〔その他の注意〕

- 希釈しない本品を下水へ排出しないこと。
- 配管の詰まり防止のために、バキュームホースや排唾管及び分離器等の定期的な清掃、メンテナンスを行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温、直射日光を避け、湿気の少ない風通しのよいところで保管すること。
- 酸や熱源の近くで保管しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地