

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

*2018 年 5 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001264

歯科材料（03）義歯床材料

一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDN コード：70832000

再使用禁止

サーモベーストレー

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



上顎用



下顎用

2. 原材料

ポリカプロラクトン、着色材

3. 包装

上顎用、下顎用各 5 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 石膏模型に分離材を塗布する。
- 2) 石膏模型を容器に入れ、本品を模型上に置き、70～80℃のお湯を注ぐ。
- 3) 約 1 分後、本品が軟化し、透明になったらお湯から取り出し、模型に沿って滑らかにする。
- 4) 本品と石膏模型を冷水に入れ、硬化後、本品を模型から取り外す。
- 5) 必要に応じてトリミング及び研磨を行い仕上げる。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。
- 3) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 他の製品と混用しないこと。
- 5) 使用後は必ず廃棄すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地