

機械器具（15）舌圧子
一般医療機器 舌圧子 JMDN コード：14066000

再使用禁止

滅菌舌圧子

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ：成人用、小児用

2. 原材料

天然木

3. 包装

1 本（個別滅菌包装）×100 / 箱

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。

*【使用方法等】

- 包装から本品を取り出す。
- 本品を患者の口腔内に挿入する。
- 舌を押さえ移動させて周辺臓器及び組織を観察する。

*【使用上の注意】

- 損傷（欠け、割れ、ささくれ）、変形、汚れ等を確認した場合は使用しないこと。
- 破損の可能性があるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 包装開封後は、すぐに使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、破損しないように注意すること。

〔使用期限〕

外装に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【保守・点検に係る事項】

使用前に損傷、変形、汚れ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。