

再使用禁止（ディスポーザブルカバー） オーラル+エンドワイヤレスカム

【警告】

1. 交差感染を防ぐため、必ず専用のディスポーザブルカバーを取り付けて使用すること。
2. 使用中、患者が本品を強く噛まないように注意すること。

【禁忌・禁止】

1. 本品は電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、使用時は電波を発する電気機器の電源を切ること。
2. 本品は、可燃性ガスのある場所で使用しないこと。
3. ディスポーザブルカバーは再使用禁止。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 仕様

本体寸法	225.6 mm (H) × 25.4 mm (W)
重量（カメラ）	102 g
電源電圧	DC 5V
消費電力	300 mW
画素数	1280 × 720 ピクセル
画角	100°
光源	4LED
光量	1133 lx

4. 包装

1 セット / 包

セット内容：本体、固定キャップ×2、充電スタンド、USB ケーブル、ディスポーザブルカバー×10

【別売品】

ディスポーザブルカバー 100 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

【使用前の準備】

1. 使用前に必ず、取扱説明書をよく読むこと。
初めて使用する際には、予め十分な充電を行っておくこと。
2. 取扱説明書に従い、専用ソフトウェアをインストールする。

ソフトウェアのインストール方法

- (1) 携帯電話 (iPhone/Android)、または iPad/タブレットの場合
各アプリケーションストアから、もしくは取扱説明書の QR コードを読み取り、専用ソフトウェアをインストールする。

(2) PC へのインストール方法

取扱説明書のリンク先から、PC サイトにアクセスし、専用ソフトウェアをインストールする。

【使用方法】

1. 取扱説明書に従い、専用ソフトウェアを起動させる。
2. ヘッド部とボディ部の溝を合わせ、反時計周りに捻り接続する。
3. 本品に専用のディスポーザブルカバーを取り付ける。
フォーカスや防振には、固定キャップを取り付ける。
4. 電源スイッチを約 2 秒間、長押しする。電源インジケータが緑色に変わり、LED が点灯する。数秒後、本品が起動すると電源インジケータが緑色に点滅を始める。
5. 電源インジケータの点滅が終了後、カメラを口腔内に挿入し撮影を行う。
6. 撮影終了後は、電源スイッチを約 2 秒間長押しし、電源を切る。LED が消灯し、電源インジケータが緑色に点滅する。
7. 専用ソフトウェアを終了する。
8. 取扱説明書に従い、清掃・消毒・滅菌を行う。
(オートクレーブ滅菌不可)

【使用環境】

温度：-25～50℃
湿度：10～90%
気圧：860～1,060hpa

【使用上の注意】

1. 本品の LED 照明を患者の目に照射しないこと。また、直視しないこと。
2. 本品は電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、使用時は電波を発する医療機器の電源を切ること。
3. ディスポーザブルカバーは再使用禁止。
4. 濡れた状態で使用しないこと。
5. 使用の際は、必ず専用のディスポーザブルカバーを装着すること。
6. 充電中は電源を切っておくこと。
7. 充電は専用の充電スタンド、USB ケーブルを使用して行うこと。
8. 電磁波を発する機器付近での使用はしないこと。
9. 内蔵のリチウム電池は取り外さないこと。
10. 過放電を防ぐため、使用しない場合でも定期的に充電を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 適正な濃度の消毒用エタノールを含ませた不織布等で汚れをふき取り、水のかからない場所で保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

【保管環境】

温度：-40～55℃
湿度：93%以下
気圧：860～1,060hpa

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Shanghai Minimirror Medical Instrument Co., Ltd.
(シャンハイ ミニミラー メディカル インストルメント社)

製造国：中華人民共和国