

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ JMDNコード：70179000

再使用禁止（ディスポーザブルカバー） オーラル+エンドワイヤレスカム

【警告】

- 交差感染を防ぐため、必ず専用のディスポーザブルカバーを取り付けて使用すること。
- 使用中、患者が本品を強く噛まないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- 本品は電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、使用時は電波を発する電気機器の電源を切ること。
- 本品は、可燃性ガスのある場所で使用しないこと。
- ディスポーザブルカバーは再使用禁止。

*【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
本体



電源スイッチ
電源インジケータ



ヘッド部

- 仕様

本体寸法	225.6 mm(H) × 25.4 mm(W)
重量（カメラ）	102 g
電源電圧	DC 5V
消費電力	300 mW
画素数	1280 × 720 ピクセル
画角	100°
光源	4LED
光量	1133 lx

- 包装

1セット / 包

セット内容：本体、固定キャップ×2、充電スタンド、USBケーブル、ディスポーザブルカバー×10

【別売品】

ディスポーザブルカバー 100枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

【使用前の準備】

- 使用前に必ず、取扱説明書をよく読むこと。
初めて使用する際には、予め十分な充電を行っておくこと。
- 取扱説明書に従い、専用ソフトウェアをインストールする。

ソフトウェアのインストール方法

- 携帯電話（iPhone/Android）、またはiPad/タブレットの場合
各アプリケーションストアから、もしくは取扱説明書のQRコードを読み取り、専用ソフトウェアをインストールする。
- PCへのインストール方法
取扱説明書のリンク先から、PCサイトにアクセスし、専用ソフトウェアをインストールする。

【使用方法】

- 取扱説明書に従い、専用ソフトウェアを起動させる。
- ヘッド部とボディ部の溝を合わせ、反時計周りに捻り接続する。
- 本品に専用のディスポーザブルカバーを取り付ける。
フォーカスや防振には、固定キャップを取り付ける。
- 電源スイッチを約2秒間、長押しする。電源インジケータが緑色に変わり、LEDが点灯する。数秒後、本品が起動すると電源インジケータが緑色に点滅を始める。
- 電源インジケータの点滅が終了後、カメラを口腔内に挿入し撮影を行う。
- 撮影終了後は、電源スイッチを約2秒間長押しし、電源を切る。LEDが消灯し、電源インジケータが緑色に点滅する。
- 専用ソフトウェアを終了する。
- 取扱説明書に従い、清掃・消毒・滅菌を行う。
(オートクレーブ滅菌不可)

【使用環境】

温度：-25～50℃

湿度：10～90%

気圧：860～1,060hpa

【使用上の注意】

- 本品のLED照明を患者の目に照射しないこと。また、直視しないこと。
- 本品は電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、使用時は電波を発する医療機器の電源を切ること。
- ディスポーザブルカバーは再使用禁止。
- 濡れた状態で使用しないこと。
- 使用の際は、必ず専用のディスポーザブルカバーを装着すること。
- 充電中は電源を切っておくこと。
- 充電は専用の充電スタンド、USBケーブルを使用して行うこと。
- 電磁波を発する機器付近での使用はしないこと。
- 内蔵のリチウム電池は取り外さないこと。
- 過放電を防ぐため、使用しない場合でも定期的に充電を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 適正な濃度の消毒用エタノールを含ませた不織布等で汚れをふき取り、水のかからない場所で保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

【保管環境】

温度：-40～55℃

湿度：93%以下

気圧：860～1,060hpa

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shanghai Minimirr Medical Instrument Co., Ltd.
(シャanghai ミニミラー メディカル インスツルメント社)

製造国：中華人民共和国