

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

*2018 年 6 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001327


歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN コード：70893000

Ci New パラフィンワックス

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

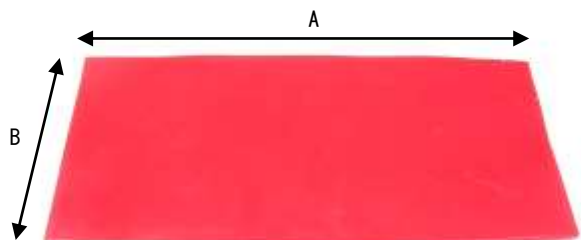

C：厚さ

タイプ	サイズ (A×B×C)
ピンク	146×74×1.4
レッド	146×74×1.4

(サイズ単位：mm)

2. 原材料

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
カルナバワックス他

3. 包装

各タイプ 計 1Kg / 箱

*【使用目的又は効果】

本品は主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。
- 2) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 40℃以下の場所で保管すること。
- 2) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、車両内）に放置しないこと。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

( 20YYMM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Associated Dental Products Limited

(アソシエティッドデンタルプロダクツリミテッド社)

製造国：イギリス