

*2018 年 11 月改訂（第 2 版）

2018 年 9 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001371

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

K・キャスティングワックス

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



色	作業温度	融点
レッド	50℃	65℃
グリーン		

2. 原材料

パラフィンワックス、着色剤、その他

3. 包装

45 g / 個

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製用に用いる。

【使用方法等】

本品を加温し、軟化させたものでインレーやクラウン等の補綴物の原型を作製する。

*【使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 30℃以下の場所で保管すること。
- 2) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、車両内）に放置しないこと。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

（ 20YYMM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Associated Dental Products Limited

（アソシエティッドデンタルプロダクツリミテッド社）

製造国：イギリス