

再使用禁止

シュアミキシングチップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状			
カラー	ピンク	グリーン	イエロー
タイプ	中	太	細
全長(mm)	81.7	85.9	69.0

■付属品

オーラルチップ
※イエローにのみ付属

2. 原材料

本体：EP ポリマー
オーラルチップ：EP ポリマー

3. 包装

ピンク：50 個 / 包
グリーン：50 個 / 包
イエロー：50 個+オーラルチップ（15 個） / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

- 1) ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、ペーストの試し出しを行い、2 種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
- 3) カートリッジ先端に本品をしっかりと装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は、使用するカートリッジのミキシングチップ装着方法に準じる。）
- 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Sherpa Korea（シェルパ코리아社）
製造国：大韓民国