

イージープレス

【禁忌・禁止】

1. 取扱説明書をよく読むこと。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. ヒーター部は高温になる為、火傷に注意すること。
4. 周囲に可燃性のものは置かないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記外観写真の通り



①	トップカバー	⑩	ヒーターケース
②	本体	⑪	エアーコネクター
③	圧力計	⑫	レギュレーター
④	ヒーター	⑬	ラベル
⑤	上段スライド	⑭	操作スイッチ
⑥	下段スライド	⑮	電源
⑦	作業台	⑯	スプリング
⑧	ビーズケース	⑰	ヒューズボックス
⑨	サポートフィクスチャー	-	-

2. 仕様

寸法	W410xD260xH545mm
重量	15kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	450W
圧力	0.4～0.6MPa

3. 原材料

ABS、アルミニウム、ステンレススチール

4. 包装

1 台/箱

【使用目的又は効果】

熱可塑性材料を加熱・加圧で成形し、義歯床等の歯科用装置を作製する。

【使用方法等】

〔使用前の準備〕

取扱説明書をよく読むこと。

1. 電源ケーブルを本体及びコンセントに接続する。
2. エアーチューブ(Ø8mm)を本体のエアーコネクターに接続する。(圧力計の作動を確認すること。)

3. 出荷時の設定気圧は 0.5MPa である。(圧力計が作動しない場合は、使用中の接続回路にエアーが通っているか確認すること)
4. 下段スライドを前方に回転させ、ビーズケースは本体の作業台に乗せる。

〔使用方法〕

1. 目的に合うシートを選択する。(テンポラリー、スプリント、リテーナー、ブリーチなど)
2. 模型をビーズケースの真ん中に乗せる。
3. 下段スライドに丸型(○)又は、四角型(□)のシートをガイドラインに合わせセットし、上段スライドを〔A〕青色のリングが見えるように乗せる。



〔A〕

4. トップカバーの「Heater」スイッチを押す。(ランプが点灯し、ヒーターが加熱待機モードになる。)

〔トップカバーの操作スイッチ〕




Heater	シートの加熱・軟化
Cylinder	上下操作・真空
Pressure	加圧・模型の成形

5. 下段スライドを左に 90 度回転させる。この際、ヒーターは自動的に加熱状態になる。
6. シートが模型の高さ、又は 1/2 くらいに垂れるまで待つ。(加熱時間は 50～90 秒にする。シート material や厚さにより時間を調節すること。〔B〕)



〔B〕

7. 両スライドを右に 180 度回転させる。(本体の中央の模型の位置)
8. 「Cylinder」スイッチを押す。(ランプが点灯、エアーケースが下がり、上・下段スライドを加圧し、真空待機状態になる。〔C〕)

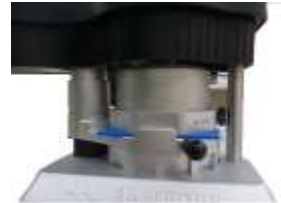

〔C〕

※取扱説明書を必ずご参照ください。

9. 「Pressure」スイッチを押す。この際、エアーケースにエアーが注入され、シートは完全に模型に圧接される。（作動時間はシートの材料や厚さにより3分～5分内外にする。）
10. 「Pressure」スイッチを切り、「Cylinder」スイッチも切る。
11. 下段スライドを左に90度回転させる。
12. 上段スライドを外し、模型及び成形されたシートを取り出す。
13. 「Heater」スイッチを切る。

【使用上の注意】

1. 本品は精密機械であるので取り扱いには注意すること。
また使用法は必ず取扱説明書を熟読すること。
2. 本品を改造・分解しないこと。
3. ヒーター部は高温になる為、火傷に注意すること。
4. 軟化中のシートに触れるとシートの変形及び火傷する恐れがある。
5. 周囲に可燃性のものは置かないこと。
6. ヒーターの上に物を置かないこと。
7. 水平で、振動のない安定した場所に設置すること。
8. 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清掃しておくこと。
9. アース線とともに使用すること。
10. 破損、故障の場合は自分で修理しようとせず、必ず販売元へ連絡すること。

【保管方法及び有効期間】

1. 温度、湿度、気圧に注意し適切に保管すること。
2. 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
3. 水のかからない場所に保管すること。
4. 歯科関係者以外が触れないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 水で湿らせた柔らかい布で機器表面の汚れを拭き取った後、乾いた柔らかい布で拭くこと。
2. 有機溶剤で清掃しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：3A MEDES（スリーエーメデス社）
製造国：大韓民国