

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

*2020 年 3 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001415

機械器具（66）歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

再使用禁止

ニューボリュームミキシングチップ

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd.（セイルグローバル社）
製造国：大韓民国

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



2. 原材料

外側：ポリプロピレン

スクリュー部分：ポリオキシメチレン

3. 包装

50 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) あらかじめ使用する印象材等のカートリッジに本品が適合することを確認する。
- 2) 2 種のペーストがカートリッジから均等に吐出されることを確認する。
- 3) カートリッジに本品を取り付ける。
- 4) 使用前に試し出しをし、2 種のペーストが均等に練和されていることを確認し使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されているかを確認すること。
- ・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した場合、無理に操作しないこと。。

【使用上の注意】

- 1) 本品は単回使用とし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 4) 本品を分解、改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。