

**2025 年 7 月改訂（第 3 版）
*2024 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001423

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDN コード：70901000

サーコトリム

**【形状、構造及び原理等】

1. 外観

HP 用



800720

2. 原材料

作業部：シリコーンゴム、シリコンカーバイド
シャंक部：ステンレスチール

3. 包装

1 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工物を研削、研磨するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 技工用ハンドピースに装着し、回転させ振れがないことを確認する。
- 振れがなければ、研削、研磨する。
※推奨回転数：6,000～15,000rpm
※最大回転数：15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ヘッドの形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 安全の為に、防護眼鏡を使用すること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない場所に保管すること。
- 保管中、破損しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DFS-DIAMON GmbH
（ディーエフエス ダイヤモン社）
製造国：ドイツ