

機械器具（66）歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000

## 再使用禁止

# LK ポリウムミキシングチップ

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



2. 原材料  
ポリプロピレン

3. 包装  
50本/袋

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具をいう。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

- 1) あらかじめ使用する印象材等のカートリッジに本品が適合することを確認する。
- 2) 2種のペーストがカートリッジから均等に吐出されることを確認する。
- 3) カートリッジに本品を取り付ける。
- 4) 使用前に試し出しをし、2種のペーストが均等に練和されていることを確認し使用する。

#### [使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されているかを確認すること。
- ・ペーストを抽出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した場合、無理に操作しないこと。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品は単回使用とし、再使用を禁止とする。
- 2) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
- 4) 本品を分解、改造しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。