

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN コード：70908000

ホワイトポイントバーJ

【禁忌・禁止】

1. 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
FG 用



全長	作業部長	作業部最大径
23.0	8.0	2.2

[寸法単位：mm]

2. 原材料
作業部：コランダム
シャंक部：ステンレススチール

3. 包装
5 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研削に用いる器材である。

*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。)
- 2) 歯科用電気駆動装置等に装着する。
- 3) あらかじめ口腔外で回転させ、ブレがないことを確認し、研削、研磨する。
※推奨回転数：80,000～100,000rpm
※最大回転数：100,000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・ 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるもので十分に注意すること。

*【使用上の注意】

1. 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保管・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌について
[洗浄]
 - ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
 - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
 - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
 - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
[滅菌]
 - ・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌は134℃以下厳守】
[その他]
 - ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
2. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：JOTA AG
(ジョタ エージー社)
製造国：スイス