

**2024 年 1 月改訂（第 7 版）

* 2020 年 12 月改訂（第 6 版）

届出番号：17B2X10001001450

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

再使用禁止

ウィングミキシングチップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DXM Co., Ltd.（ディーエックスエム）

製造国：大韓民国

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観代表例は下記の通り

ヘビーボディ ライトボディ ジャックポットバイト
オーラルチップ付



2. 原材料

ポリプロピレン

スクリュー：ポリアセタール樹脂

ジャックポットバイト：EP ポリマー

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
2. 2 種のペーストがカートリッジから均等に吐出されることを確認する。
3. カートリッジ先端に本品を装着する。
4. 使用前に試し出しをし、2 種のペーストが均等に練和されていることを確認し使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に使用するカートリッジに本品が適合することを確認すること。
- ・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

*【使用上の注意】

1. 本品は単回使用医療機器であるため、再使用はしないこと。
2. 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
3. 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
4. 本品を分解、改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。