

エキスプローラーLEVANTE

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造 下記の通り

両頭タイプ 代表例：560/3. SL



製品コード	全長
560/1. SL	175.0 mm
560/2. SL	
560/3. SL	

片頭タイプ 代表例：555/9. SL



製品コード	全長
555/2. SL	165.0 mm
555/23. SL	160.0 mm
555/6. SL	165.0 mm
555/8A. SL	160.0 mm
555/9. SL	165.0 mm

2. 原材料

作業部：ステンレススチール
ハンドル部：シリコン

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯石の探査や修復部の探査を行う為に用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃下厳守。）
- 2) 本品の先端部を使って、歯石の探査や修復部の探査を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

・使用後歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s. r. l.（メデシー社）
製造国：イタリア