

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000
ミラーハンドル LEVANTE

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
代表例：4907/R0



製品コード	カラー	全長
4907/AR	オレンジ	130.0 mm
4907/R0	レッド	
4907/VE	グリーン	

2. 原材料
シリコン、ステンレススチール
3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内で歯等を見る為の鏡を保持するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃下厳守。）
2) 本品を鏡と確実に接合させ、これを把持して使用する。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- ・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s. r. l.（メデシー社）
製造国：イタリア