

機械器具（25）医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

## グラス両面ミラー

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



BR190760N  
咬合面用(大)



BR190761N  
咬合面用(小)



BR190767N  
頬側用



BR190798N

### 2. 原材料

ミラー：ガラス  
ハンドル：シリコン

### 3. 包装

ミラー：1個 / 包  
ハンドル：1本 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む135℃。）
- 2) ミラーとハンドルを確実に接合させ使用する。

### \*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

#### 2) 洗浄・滅菌について

##### [洗浄]

- ・使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

### [滅菌]

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む135℃】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

### [その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地