

医療用品(04) 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード: 35531000

## 再使用禁止

## Gi サージカルドレープ

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

W型パウチ付き 穴あきテープ付



穴なし



タイプ	ドレープサイズ	穴サイズ
W型パウチ付 穴あきテープ付	90×90 cm	φ3×5 cm
		φ5×8 cm
穴なし	45×45 cm	—
	60×60 cm	—
	90×90 cm	—
	120×120 cm	—

#### 2. 原材料

- ・W型パウチ付、穴あきテープ付  
不織布部: SMMS 不織布、両面粘着テープ  
パウチ部: ポリ塩化ビニル、ポリオレフィンシート
- ・穴なし  
SMMS 不織布

#### 3. 包装

1枚 / パック

### 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は単回使用である。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認する。
- 2) 無菌操作で包装から取り出す。
- 3) 粘着テープの台紙をはがし、使用目的の部位・場所に掛けて使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品はディスポーザブル製品であり、再使用・再滅菌はしないこと。

- 3) 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 4) 高温を発する機器類に接しないように注意すること。
- 5) 粘着テープをはがす際には、皮膚からゆっくりはがすこと。
- 6) 本品の使用により、皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 7) 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

直射日光、水濡れ、高温、多湿の環境を避け、涼しいところで保管すること。

#### 【使用期限】

包装に記載の使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)  
(※YYYY-MMはYYYY年MM月を示す)

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル  
住所: 石川県能美市福島町に152番地