

ヴェルサス 385

【禁忌・禁止】

1. 保護カバーを開けた状態で使用しないこと。
2. 機器の改造や分解をしないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 1.形状・構造
下記の通り



2.仕様

外形寸法	350 mm × 424 mm × 624 mm
重量	65 kg
電気の定格	100～240VAC 50/60Hz 350W
光源	385nm UV LED
造形範囲	125 mm × 70 mm × 185 mm
造形方式	デジタルライトプロセッシング (DLP)
積層ピッチ	10～100 ミクロン
接続方法	Wifi、イーサネット、USB
対応ファイル形式	STL、SLC、Zip

3.原材料

プラスチック、スチール、ガラス他

4.包装

1 セット / 箱

セット内容: 本体、プラットホーム、レジンタンク、レジンタンクカバー、
レジンタンク用スタンド、調節脚用レンチ、六角レンチ、
交換用フィルター2 種、へら、ラテックスシリンジ、ピンセ
ット、電源アダプター、LAN アダプター

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に
設置して歯科修復物のコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

使用前に必ず、取扱説明書をよく読むこと。
温度が 20～27℃で、湿度の少ない安定した環境で使用する。

【使用方法】

- 1) 本体に電源コードを接続し、コンセントに差し込む。
- 2) 本体を水平に設置する。
- 3) プラットホーム及びレジンタンクを固定する。
- 4) レジンを充填する。
- 5) データを読み込み、造形を開始する。
- 6) 造形終了後、造形物を取り出す。
- 7) アプリケーションが起動していないことを確認し、電源を切る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 使用するレジンの取扱説明書をよく読み使用すること。
2. 必ず使用前に前回使用時の残留物や余分な樹脂が残っていない
か確認すること。残っている場合は、取り除いてから使用すること。
3. 光源を直視しないこと。

4. 電源を切る際は、タッチスクリーン上のアプリケーションを全て終了
し 20 秒程経過してから、本体背面の主電源を切る。
5. 使用中、本体の温度が 70℃を超える箇所があるため、十分注意す
ること。

【使用上の注意】

1. 精密機械のため、取扱いには十分に注意すること。
2. 歯科技工士及び歯科医師が使用すること。
3. 振動のない安定した場所に設置すること。
4. エアフィルター横に物を置くなどして塞がないこと。
5. 装置に異常がみられる場合は、使用しないこと。
6. 可燃物がある場所、直射日光の当たる場所に置かないこと。
7. 洗浄の際、アルコール等の薬品や研磨剤は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 水のかからない場所に保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃などに対する安定状態に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず危機
が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 3) 機器の分解・改造はしないこと。
- 4) 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い
修理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者: MICROLAY 3D PRINTERS
(マイクロレイ スリーディ プリンターズ)
製造国: スペイン

取扱説明書を必ずご参照ください。