

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDNコード：41876000
ツインプラグー

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

***【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

下記の通り

代表例：GP PLUGGER #3



製品名	先端径 ニッケルチタン側	先端径 ステンレス側	色
GP PLUGGER #1 (35/03 70/02)	0.35	0.7	緑
GP PLUGGER #2 (40/03 80/02)	0.40	0.8	黒
GP PLUGGER #3 (50/03 100/02)	0.50	1.0	黄
GP PLUGGER #4 (60/03 120/02)	0.60	1.2	青

[寸法単位：mm]

2. 原材料

作業部：ニッケルチタン合金 / ステンレススチール

ハンドル部：アルミニウム

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、根管内に充填物を充填するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134℃。）
- 2) 先端部を使用して、根管に充填物を充填する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

4) 洗浄・滅菌

[洗浄]

- ・使用後歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ワールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む134℃】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd.

（シャンハイ ファンタ デンタル マテリアルズ社）

製造国：中華人民共和国