

機械器具(21)内蔵機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ JMDN コード:70179000

スマートカメラの付属品
ワイヤレスシステム

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1.形状・構造
以下の通り



①	ワイヤレスドッキングステーション
②	USB リンク
③	ワイヤレスパック

2.仕様

寸法、重量	①	122.5 mm × 100 mm × 35 mm 290.2 g
	②	21 mm × 85 mm × 16 mm 16 g
	③	69.1 mm × 31.5 mm × 39.4 mm 73 g
電圧	DC 5V、1.2A	
接続方法	USB 2.0	
充電時間	2 時間 30 分	
連続使用時間	20～40 分	
動作可能範囲	パソコンから 5m 以内	

3.包装

- 1 セット / 包
セット内容:ワイヤレスドッキングステーション、USB リンク、
ワイヤレスパック、USB ケーブル、電源アダプター

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に用いる。

【使用方法等】

- 1)電源アダプターをドッキングステーションに接続し、ワイヤレスパックを充電する。
2)USB リンクに USB ケーブルを接続し、ケーブル先端をパソコンの USB ポートに差し込む。
3)「UWB Connection Manager」をインストールする。
4)付帯する口腔内カメラにワイヤレスパックを接続し、ワイヤレスパックのつまみを「ON」にし、電源を入れる。

操作方法については、販売名「スマートカム」の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 付帯する口腔内カメラ以外の製品に取り付けて使用しないこと。
2.正しく画像がパソコンへ送れない可能性があるため、ワイヤレスパックを手でふさがないこと。
3.長時間使用しない場合は、ワイヤレスパックの電源を切った状態で充電すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1)水のかからない場所に保管すること。
2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1)必ず定期点検を行うこと。
2)しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 歯愛メディカル
住所:石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号:076-278-8800

製造業者:Winus Technology Co., Ltd.
(ウィナステクノロジー社)
製造国:大韓民国