

*2023 年 2 月改訂（第 2 版）
2020 年 3 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001524

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

再使用禁止

リセラディスポミラー

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【保守・点検に係る事項】

使用前に汚れ、破損、ヒビ、腐食又は曇り等がないか点検すること。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料

ガラス、PP、着色剤

3. 包装

1 本（個包装）×10 / 包

10 本 / 包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

口腔内にて反射鏡として使用する。

*【使用上の注意】

1. 本品は滅菌品であるため、再滅菌しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 包装に破損や異常が認められた場合は使用しないこと。
4. 器具の形状変更や改造はしないこと。
5. 子供等の診療・治療においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し怪我をする恐れがある。
6. 破折等による誤飲の恐れがあるため、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ、切削、加圧。
 - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下、強い衝撃を与える等）

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 水濡れに注意し、高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）