

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード:34864000

再使用禁止

Ci インジェクションパッド マイルド

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造



パッド部径:16.0 mm
粘着テープ部径:36.0 mm

2.原材料

パッド部:ポリエステル不織布

粘着テープ部:合成繊維、ゴム系粘着剤(ラテックスフリー)

3.包装

100 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1)袋を開封し、本品を取り出す。
- 2)台紙から粘着テープを剥がし、穿刺部にパッドをあて、粘着テープを押さえて固定するように貼付する。

【使用上の注意】

- 1.本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し適切に治療を行うこと。
- 2.本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合は、直ちに患部を清潔にして張り替えること。
- 3.開封後は、直ちに仕様すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光及び下記を避け、湿度の少ない清潔な場所に保管すること。

[使用期限]

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 歯愛メディカル

住所:石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号:076-278-8800

製造業者:WAYSON Medical Co., Ltd.

(ウェイソン メディカル社)

製造国:中華人民共和国