

歯科材料（09）歯科用研削材料
 一般医療機器 歯磨カップ JMDNコード：16184000
 （一般用医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDNコード：35768000）

再使用禁止**ブラシ付マルチプロフィカップ****【禁忌・禁止】**

- 1) 再使用禁止。
- 2) 本品に使用されている材質（ニッケル、シリコン）に対し、感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

2. 本品は単回使用のため、再使用を禁止する。
3. 必要に応じ、使用前に滅菌処理を行うこと。
【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守。】
4. 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させること。
水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
5. 安全の為に保護めがねを使用すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
CA用



色調	タイプ
オレンジ	ソフト
ピンク	
グリーン	レギュラー
パープル	

カップ最大径	ブラシ部径	カップ長	全長
6.0 mm	2.0 mm	8.9 mm	22.6 mm

2. 原材料

カップ部：シリコン
 ブラシ部：ナイロン
 シャンク部：ニッケルメッキ銅

3. 包装

100本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯の清掃及び研磨に用いる回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

- 1) 清掃もしくは研磨する部位に応じて本品を選択する。
- 2) 歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 必要に応じ、研磨材を適量塗布する。
- 4) 歯面に軽く押し付け、清掃・研磨する。
※推奨回転数：5,000～7,000rpm
※最大回転数：15,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・予め患者の口腔外で回転させて、振れないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ヘッドの形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前後は破損、ヒビ、大きな腐食やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
 住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
 電話番号：076-278-8800