

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード：70757000
（一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDN コード：70887000）

再使用禁止

DESS スキャンアバットメント IOS

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造

製品名	製品コード
3I CERTAIN NP 3.4	52.014
3I CERTAIN RP 4.1	52.015
3I CERTAIN WP 5.0	52.016
3I OSSEOTITE NP 3.4	52.011
3I OSSEOTITE RP 4.1	52.012
3I OSSEOTITE WP 5.0	52.013
ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 20°	52.036
ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 45°	52.037
ASTRA OSSEOSPEED RP 3.5-4.0	52.024
ASTRA OSSEOSPEED WP 4.5-5.0	52.025
ASTRA TECH EV 3.6	52.059
ASTRA TECH EV 4.2	52.060
ASTRA TECH EV 4.8	52.061
ASTRA TECH EV UNIABUTMENT	52.058
MULTI-UNIT RP 4.8	52.007
MULTI-UNIT WP 6.5	52.047
NOBEL ACTIVE NP 3.5	52.041
NOBEL ACTIVE RP 4.3	52.042
NOBEL BRANEMARK NP 3.5	52.001
NOBEL BRANEMARK RP 4.1	52.002
NOBEL BRANEMARK WP 5.1	52.003
NOBEL REPLACE SELECT NP 3.5	52.004
NOBEL REPLACE SELECT RP 4.3	52.005
NOBEL REPLACE SELECT WP 5.0	52.006
STRAUMANN BONE LEVEL NP/RP	52.098
STRAUMANN BONE LEVEL NP 3.3	52.043
STRAUMANN BONE LEVEL RP 4.1	52.044
STRAUMANN TISSUE LEVEL RN 4.8	52.009
STRAUMANN TISSUE LEVEL WP 6.5	52.045
STRAUMANN BLX RB/WB	52.062
Xive NP 3.4	52.038
Xive RP 3.8	52.039
Xive WP 4.5	52.040
ZIMMER SCREW-VENT NP 3.5	52.017
ZIMMER SCREW-VENT RP 4.5	52.018
ZIMMER SCREW-VENT WP 5.7	52.019
Camlog 3.3	52.072
Camlog 3.8	52.073
Camlog 4.3	52.064
Camlog 5.0	52.065
Osstem TS Mini	52.066
Osstem TS Regular	52.067

2. 原材料

チタン合金、ピーク、ZrN コーティング

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで製作するため、デジタル印象採得を行う器具である。

【使用方法等】

【使用前の準備】

1. 口腔内に埋植されたインプラント体の種類に対応する本品を選択する。
2. 使用する歯科用 CAD/CAM システムの CAD ソフトウェア内のスキャンボディ（スキャンアバットメント）ライブラリに、各メーカーが存在しているか確認すること。
3. 口腔内で使用する際は、本品が滅菌されているかを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。121℃で 30 分間。乾燥工程可。）

【使用方法】

1. 口腔内に植立されたインプラント体に本品を装着・固定する。
2. 装着した本品及び、インプラント体周辺のデジタル印象採得を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本品を口腔内で使用する場合は、誤飲させないように十分に注意すること。
2. 本品に過度な力がかかるなどの、衝撃を与えないこと。
3. 使用する歯科用 CAD/CAM システムの操作方法に従いデジタル印象採得をし、印象状況に不具合がないか画像状態の確認を必ず行うこと。
4. 本品はスチーマー洗浄しないこと。
5. 表面に汚れ等が付着した場合は水でぬらした柔らかい布でやさしく拭くこと。
6. 使用する歯科用 CAD/CAM システムによっては使用方法の順序が違う場合があるが、システムの使用手順（マニュアル）にあわせて使用すること。

【使用上の注意】

1. 口腔内での使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 本品の形状変更、改造は絶対にしないこと。
3. 本品に異常・変形・破損等が認められる場合は、すぐに使用を中止し新しいものと交換すること。
4. 併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方法に準じて作業すること。
5. オートクレーブ滅菌可。[121℃で 30 分間。乾燥工程可。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を長期間使用しなかった場合、使用前に正常に機能することを確認してから使用すること。
2. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Terrats Medical, S.L.（テラッツ メディカル社）

製造国：スペイン