

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

アンチフォグミラー

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料

本体：ポリカーボネート、ABS 樹脂
ミラー：ステンレススチール

3. 包装

1 セット / 箱
セット内容：本体、充電用 USB ケーブル、ミラー各 1 枚
(咬合面用大、咬合面用中、頬側用、舌側用)

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前にミラーが滅菌済みかを確認すること。
(ミラーのみオートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。)
- 2) 本体裏側にあるスロットにミラーを差し込む。
- 3) 適宜、「送風」、「ライト」の操作を行う。※[表 1]を参考

[表 1]

ボタン	1 回押し	作動中 1 回押し
	送風	停止
	送風 / ライト	停止 / 消灯

- 4) 使用後はミラーを取り外し、適切に消毒及び清拭を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 使用前に傷、バリ等がないか確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

4) 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

- ・ミラーのみオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度は 134℃以下】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に従って使用すること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、注意すること。特に長時間の浸漬は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 4) 外圧（物理的負荷、振動、衝撃）及び、落下の危険がない安定した場所に保管すること。
- 5) ガラス鏡面を保護するため、他のインスツルメントとの接触を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd.

(シャンハイ ファンタ デンタル マテリアルズ社)
製造国：中華人民共和国