

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

アンチフォグミラー


**【形状、構造及び原理等】

1. 外観

[全体]



[ミラー]

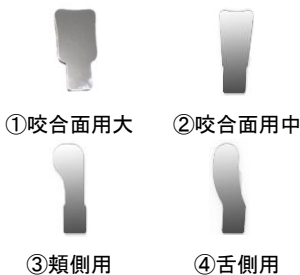

2. 原材料

本体：ポリカーボネート、ABS 樹脂
ミラー：ステンレススチール

3. 包装

セット：本体、充電用 USB ケーブル、ミラー各種 1 枚/箱
ミラー単品：1 枚/包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前にミラーが滅菌済みかを確認すること。
(ミラーのみオートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。)
- 2) 本体裏側にあるスロットにミラーを差し込む。
- 3) 適宜、「送風」、「ライト」の操作を行う。※[表 1]を参考

[表 1]

ボタン	1 回押し	作動中 1 回押し
	送風	停止
	送風 / ライト	停止 / 消灯

- 4) 使用後はミラーを取り外し、適切に消毒及び清拭を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 使用前に傷、バリ等がないか確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 5) 形態変更や改造などはしないこと。
- 6) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 4) 外圧（物理的負荷、振動、衝撃）及び、落下の危険がない安定した場所に保管すること。
- 5) ガラス鏡面を保護するため、他のインスツルメントとの接触を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ・ 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ・ クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ・ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

- ・ ミラーのみオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度は 134℃以下】
- ・ 乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- ・ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に従って使用すること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、注意すること。特に長時間の浸漬は避けること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd.
(シャanghai ファンタ デンタル マテリアルズ社)
製造国：中華人民共和国