

再使用禁止

HPD ミキシングチップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



先端径 × 全長 (mm)
φ2.27 × 105.09

2. 原材料
エチレンプロピレンコポリマー、着色剤
3. 包装
50 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和し、口腔内又はトレーに注入するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) ディスペンサーガン（別売）に印象材料等のカートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップを取り外し、2 種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
- 3) カートリッジ先端に本品を装着する。
- 4) 使用前に試し出しをし、2 種のペーストが均等に練和されていることを確認してから使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に使用するカートリッジに本品が適合することを確認すること。
- ・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を分解、改造などしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 3) 使用后、本品を取り外すか、装着したまま保管するかは、使用する製品（カートリッジ）の指示に従うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Sherpa Korea（シェルパ코리아）
製造国：大韓民国