

\*\*2026 年 1 月改訂（第 3 版）

\*2024 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001604

医療用品（04）整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード：34655000

再使用禁止

## Gi 非固着性ドレッシング

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：WAYSON Medical Co., Ltd.

（ウェイソン メディカル社）

製造国：中華人民共和国

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観



#### 2. 原材料

創傷適用面：ポリエチレンフィルム

吸収層：ビスコースレーヨン+ポリエステル

外表面：熱間圧延不織布

#### 3. 包装

100 枚 または 25 枚 / 箱

### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を保護し、滲出液を吸収するために用いる不織布である。

### 【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 創傷部位及び創傷部周辺の皮膚を清潔にする。
- 2) 本品を無菌袋より取り出す。
- 3) 光沢のある面を創傷面にあて、テープ等で固定する。

### 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・包装に開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと。
- ・開封後は直ちに使用すること。
- ・貼付けの際は、必ず本品の表裏を確認すること。外表面は撥水加工をしてあるため、滲出液を吸収しないため。
- ・交換時、本品の創傷面に固着している時は、無理に剥がさず、固着している部分を湿らせ柔らかくしてから剥がすこと。
- ・重度の傷ややけど等には使用しないこと。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・痛み等が生じた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）