

*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2021 年 1 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001609

機械器具（39）医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN コード：70935000

Zir ホルダー

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造等

外観写真は以下のとおり

代表例：前歯用



タイプ	先端形状	全長
前歯用		145 mm
臼歯用		145 mm
前歯+臼歯		161 mm

2. 原材料

作業部：ステンレススチール

把持部：アルミニウム

3. 包装

本体、交換用シリコンカバー×4 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工に用いる手動式の鉗子である。

【使用方法等】

- 1) 本体先端にシリコンカバーを装着する。
- 2) 先端部を補綴物の内側に挿入し、保持する。

*【使用上の注意】

1. 器具にして、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
3. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 使用後は汚れ等を除去すること。
3. 洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：LEPIO Co., Ltd.（レピオ社）

製造国：大韓民国