

クラウニー

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り



全長 : 148mm

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル
住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : DFS-DIAMON GmbH (ディーエフエス ダイヤモン社)
製造国 : ドイツ

- 原材料

ステンレススチール、ダイヤモンド粒子

- 包装

1 本/包

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工に用いる手動式の鉗子である。

【使用方法等】

- 先端部を補綴物の内側に挿入する。
- ハンドル部中央の調節ネジを回して維持力を調整する。

【使用上の注意】

- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 可動部の動きがスムーズであることを確認すること。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。