

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDNコード：70904000

フローパウダー

【禁忌・禁止】

- 下の患者には使用しないこと。
 - 呼吸器疾患のある患者。
 - ナトリウム摂取に関して制限のある患者。
 - 病的に深い歯周ポケット及び粘膜病変のある患者。[ごく稀に皮下気腫を生じるおそれがある。]
 - 肝臓障害のある患者。
 - 重篤な消化器官潰瘍のある患者。
 - 心機能障害、肺機能障害のある患者。
 - 口腔内に充血、出血、炎症、その他異常が認められる患者。
 - 口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者。
 - 本品に対してアレルギー体質のある患者。
- 長時間の連続使用は避け、患者には随時うがいをさせること。
- 歯肉縁下、軟組織、歯肉溝に向け直接噴射しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
下記のとおり
性状：白色粉末



代表例：Fast ピーチ

種類	風味	平均粒子径
Fast	レモン	65 μm
	ストロベリー	
	ピーチ	
Gentle	ノンフレーバー	65 μm
Perio	ノンフレーバー	25 μm

2. 原材料

- PT-S1：炭酸水素ナトリウム、その他
- PT-S3：グリシン、その他

3. 包装

[PT-S1]
：300 g / ボトル

[PT-S3]
・65 μm：200 g / ボトル
・25 μm：120 g / ボトル

【使用目的又は効果】

本品は粉末状の研磨材で歯面の清掃及び研磨に用いる。生物学的效果を意図せず、医薬品、生物由来原材料を含有しない。

【使用方法等】

- 使用前に本品を軽く3～5回振る。
- 本品を能動型機器接続歯面清掃用器具等（別売）の取扱説明書に従って充填、操作を行う。
- 適宜口腔内に溜まったパウダー、唾液を吸引する。
- 使用後は速やかにうがい等で口腔内を水洗する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 詳細については使用する能動型機器接続歯面清掃用器具等の取扱説明書を参照すること。
- 使用する能動型機器接続歯面清掃用器具等に使用可能な粒子径を確認すること。
- 本品を均一にするため、使用前にボトルを必ず振ること。
- 患者の口唇や口角の保護のため、ワセリンを必要量塗布すること。
- 本品を使用する場合は、バキュームを行うこと。
- 使用するエアは、清潔かつ乾燥したエアを使用すること。
- 本品が吸湿しないように注意すること。
- 使用後は本品のボトルの蓋をしっかりと閉めること。開封されたまま長時間経過した本品は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 歯根セメント、脱灰エナメル質、充填物、補綴物・充填物のマージン及びクラウン等には直接噴射しないこと。
- 万一、目に本品が入った場合は、すぐに大量の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 本品が口腔以外の粘膜部分（目、鼻等）に入らないようにすること。
- 患者と医師は目の保護をすること。コンタクトレンズを装着している患者には特段の注意を払うこと。
- 医師はマスクとグローブの着用をすること。
- 患者の唇にワセリン等を塗り、口角の乾燥またはひび割れを防ぐこと。
- 本品を飲み込んだ場合には水で洗浄し、大量の水を飲むこと。気分がすぐれない場合は、医師の診断を受けること。
- 吸い込んだ場合は新鮮な空気を吸うこと。気分がすぐれない場合は医師の診断を受けること。
- 本品の使用により、アレルギー症状が発現した患者には使用を中止し、医師の診断を受けること。

【その他の注意】

- 配管の詰まり防止のために、バキュームホースや排唾管及び分離器等の定期的な清掃、メンテナンスを行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温、直射日光を避け、湿気の少ない風通しのよいところで保管すること。
- 酸や熱源の近くで保管しないこと。

【有効期間】

- 容器に記載されている製造日より2年までに使用すること。（製造日は自己認証[製造所データ]による。）
- 開封後は、2か月以内に使い切ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
(ケイリン ウッドペッカー メディカル インstrument社)

製造国：中華人民共和国