

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDNコード：70904000

ノンフッ素メルティープロフィー

【禁忌・禁止】

本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：ペースト状
フレーバー：ストロベリー

2. 原材料

シリカ、グリセリン、香料、水、その他

3. 包装

200 g / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯面を清掃、研磨するために用いるペースト状の研磨材である。

【使用方法等】

本品をブラシ又はカップ部適量取り、歯面の清掃、研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・本品を使用する際は、防護マスク、保護メガネ、グローブを着用し、直接触れないようにすること。
- ・ペーストが飛散する恐れがあるため、低速回転で使用するこ

と。

【使用上の注意】

1. 火気の近くで使用しないこと。
2. 本品が目に入った場合は、すぐに流水で洗い、医師に相談すること。
3. 本品が皮膚に触れた場合は、石鹼と水でよく洗い流すこと。
4. 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、風通しの良い場所に保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Associated Dental Products Limited

(アソシエティッドデンタルプロダクツリミテッド社)

製造国：イギリス