

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN コード：70904000

ノンフッ素メルティープロフィー

【禁忌・禁止】

本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
性状：ペースト状
フレーバー：ストロベリー
- 原材料
シリカ、グリセリン、香料、水、その他
- 包装
200 g / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯面を清掃、研磨するために用いるペースト状の研磨材である。

【使用方法等】

本品をブラシ又はカップ部適量取り、歯面の清掃、研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 本品を使用する際は、防護マスク、保護メガネ、グローブを着用し、直接触れないようにすること。
- ペーストが飛散する恐れがあるため、低速回転で使用するこ

と。

【使用上の注意】

- 火気の近くで使用しないこと。
- 本品が目に入った場合は、すぐに流水で洗い、医師に相談すること。
- 本品が皮膚に触れた場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。
- 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、風通しの良い場所に保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。

（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Associated Dental Products Limited

（アソシエティッドデンタルプロダクツリミテッド社）

製造国：イギリス