

再使用禁止

スプレッドミキシングチップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料

ポリプロピレン

3. 包装

- 1) ミニチップ(10mL用)
ミキシングチップ、オーラルチップ 各50個/包
- 2) スタンダードチップ
ミキシングチップ 50個/包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用印象材料を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

- 1) ディスペンサーガン*に歯科用印象材等のカートリッジ*(以降、カートリッジという)を取り付ける。
 - 2) カートリッジのキャップ(又は使用済みミキシングチップ)を取り外し、ペーストの試し出しを行い、2種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
 - 3) カートリッジ先端に本品をセットし、時計回りに90°回転させ固定する。
 - 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。
- *は、別売

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- 2) ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。(ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる)
- 3) 本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 本品に損傷、変形(ひび、割れ、曲がり)等があるものは、使用しないこと。
- 4) 本品を分解、改造などしないこと。
- 5) 歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 使用後、本品を取り外すか、装着したまま保管するかは、カートリッジの使用書に従うこと。
- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Sherpa Korea(シェルパ코리아社)

製造国：大韓民国