

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

*2022 年 5 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001637

機械器具（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN コード：31848000

再使用禁止

歯周ポケットプローブ P kensa

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

深度スケール：3-4-6-8-10mm

2. 原材料

中密度綿状ポリエチレン

3. 包装

50 本（個包装） / 包

製造業者：有限会社 出雲樹脂

【使用目的又は効果】

本品は歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法】

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認すること。
- 2) 無菌操作で包装から本品を取り出す。
- 3) 本品の先端部を歯周ポケット部に挿入し、深さを測定する。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスポーザブルとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品は滅菌品であるため、再滅菌しないこと。
- 3) 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 4) 器具の形態変更や改造はしないこと。
- 5) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 6) 本品は、過度の圧力をかけたり落としたりすると破折することがあるので注意すること。
- 7) 患者の意図しない噛む行為によって破損し、又はそれが原因で患者を傷つける可能性があるので注意すること。
- 8) 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。