


歯科材料(09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDNコード:70903000

## EVE クロムプラス

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

外観写真は以下の通り

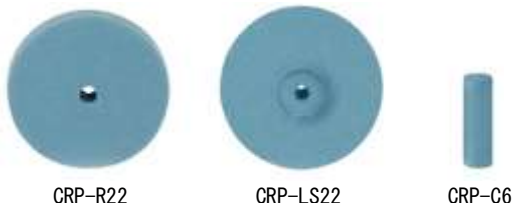

製品コード	タイプ
CRP-R22m X10	ミディアム
CRP-LS22m X10	
CRP-C6m X10	
CRP-R22f X10	ファイン
CRP-LS22f X10	
CRP-C6f X10	

#### 2. 原材料

ポリウレタン、炭化ケイ素

#### 3. 包装

10個 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品はゴム製の歯科用研磨材で、補綴物の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品をマンドレル(別売)に取り付け、歯科技工用ハンドピースに装着する。
- 2) 試運転をし、振れがないことを確認する。
- 3) 補綴物を研磨する。  
※推奨回転数: 8,000~15,000rpm  
※最大回転数: 20,000rpm

### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ・歯科用電気駆動装置等の説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・安全のために保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

### 【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前に破損や大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社歯愛メディカル  
住所:石川県能美市福島町に152番地

製造業者:EVE Ernst Vetter GmbH  
(イーブ アーンスト ベッター社)

製造国:ドイツ