

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN コード：70891000

Zhermack タイタニウム

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

形状：ペースト状（パテ）
色調：ホワイト

2. 原材料

ポリジメチルシロキサン、シリカフィラー、鉱油、着色剤

3. 仕様

練和時間	30 秒※
操作時間	1 分 30 秒※
硬化時間	6 分※
ショア A 硬度（1 時間）	90
弾性回復	99%
細線再現性	50 μ m
寸法変化（24 時間）	0.25%

※硬化ジェルを使用し、温度 23℃、湿度 50%の環境下。

4. 包装

単品：2.6 kg、5 kg / 各 1 個
付属品：計量スプーン

【使用目的又は効果】

本品は、複模型の作製に用いる合成ゴムを主成分とした印象材である。

【使用方法等】

- 1) 本品を、付属の計量スプーンすり切り一杯ずつ必要量取り、手のひらに広げる。
- 2) 広げた本品に、図 1 のように計量スプーンの縁を押し当て型をつける。
- 3) 計量スプーン 1 杯につき図 2 のように、Zhermack 硬化ジェルをチューブから 2 本分注出する。



図 1



図 2

- 4) 繰り返し折りたたむように練り、均一な色になるよう混ぜ合わせる。
- 5) 混ぜ合わせた本品を盛り、硬化を待つ。

〔組み合わせて使用する医療機器〕

販売名：Zhermack 硬化ジェル 届出番号：17B2X10001001650

【使用上の注意】

1. 他の製品と混用しないこと。
2. 使用中に発疹等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
3. 保護手袋を着用し、皮膚への接触を避けること。誤って皮膚に触れた場合は、石鹼と流水で良く洗うこと。
4. 本品は衣服に付着すると除去できないため、付着しないよう注意すること。
5. 本品を目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿、直射日光を避け、5～27℃で保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：ZHERMACK S.p.A （セルマック社）

製造国：イタリア