

\*\*2024 年 1 月改訂（第 3 版）

\*2022 年 2 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001656

歯科材料（06）歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN コード：70891000

## Zhermack ゼタラボ

### \*【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

性状：ペースト状

色調：グレー

#### 構成品

| 一般的名称     | 販売名            | 製造販売届出番号         |
|-----------|----------------|------------------|
| 歯科印象採得用器材 | Zhermack 硬化ジェル | 17B2X10001001650 |

#### 2. 原材料

ポリジメチルシロキサン、シリカフィラー、鋳油

#### 3. 仕様

|                |       |
|----------------|-------|
| 練和時間           | 30 秒※ |
| 操作時間           | 2 分※  |
| 硬化時間           | 6 分※  |
| ショア A 硬度（1 時間） | 80    |
| 弾性回復           | 98%   |
| 細線再現性          | 20 μm |
| 寸法変化（24 時間）    | 0.25% |

※硬化ジェルを使用し、温度 23℃、湿度 50%の環境下。

#### 4. 包装

単品：900 g、2.6 kg、5 kg / 各 1 個

セット品：5 kg、硬化ジェル 60ml × 2 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は、複模型の作製に用いる合成ゴムを主成分とした印象材である。

### \*【使用方法等】

- 1) 本品を、計量スプーンすり切り一杯ずつ必要量取り、手のひらに広げる。
- 2) 広げた本品に、図 1 のように計量スプーンの縁を押し当て型をつける。
- 3) 計量スプーン 1 杯につき図 2 のように、硬化ジェルをチューブから 2 本分注出する。



図 1



図 2

- 4) 繰り返し折りたたむように練り、均一な色になるよう混ぜ合わせる。
- 5) 混ぜ合わせた本品を盛り、硬化を待つ。

### 【使用上の注意】

1. 他の製品と混用しないこと。
2. 使用中に発疹等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
3. 保護手袋を着用し、皮膚への接触を避けること。誤って皮膚に触れた場合は、石鹸と流水で良く洗うこと。
4. 本品は衣服に付着すると除去できないため、付着しないよう注意すること。
5. 本品を目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

高温多湿、直射日光を避け、5～27℃で保管すること。

#### 【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：ZHERMACK S.p.A （セルマック社）

製造国：イタリア