

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード：70757000

再使用禁止

DESS AURUM ベース

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 適切な術前診断、治療計画を行ったうえで、メーカーの指定する器具などを使用すること。
3. 口腔内で使用しないこと。
4. ワックスアップ接触箇所以外にはサンドブラスト処理は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
以下のとおり。

タイプ	製品番号	
	Non-Hex	Hex
Zimmer Screw-Vent WP 5.7	36.019	37.019
Zimmer Screw-Vent RP 4.5	36.018	37.018
Zimmer Screw-Vent NP 3.5	36.017	37.017
Xive WP 4.5	36.040	37.040
Xive RP 3.8	36.039	37.039
Xive NP 3.4	36.038	37.038
Straumann Bone Level RP RC/4.1-4.8	36.044	37.044
Straumann Bone Level NP NC/3.3	36.043	37.043
Straumann Tissue Level WN 4.8/6.5	36.047	37.045
Straumann Tissue Level RN 4.1/4.8	36.046	37.009
Straumann BLX WB 4.5	36.063	37.063
Straumann BLX RB 3.5	36.062	37.062
Osstem TS STD Regular	36.073	37.073
Osstem TS Mini	36.072	37.072
Nobel Replace Select WP/5.0	36.006	37.006
Nobel Replace Select RP/4.3	36.005	37.005
Nobel Replace Select NP/3.5	36.004	37.004
Nobel Branemark RP/4.1	36.002	37.002
	36.002/2	37.002/2
	36.002/3	37.002/3
Nobel Branemark NP/3.5	36.001	37.001
	36.001/2	37.001/2
	36.001/3	37.001/3
Nobel Active/Replace CC RP 4.3/5.0	36.042	37.042
Nobel Active/Replace CC NP 3.5	36.041	37.041
Multi-Unit WP 6.5	36.054	
Multi-Unit RP 4.8	36.007	
MEGAGEN AnyRidge	36.057	37.057
Dentium Superline	36.090	37.090
Conelog WP 5.0	36.076	37.076
Conelog RP 3.8/4.3	36.075	37.075
Conelog NP 3.3	36.074	37.074
Camlog 4.3	36.066	37.066
Camlog 3.8	36.065	37.065
Astra Tech Osseospeed WP 4.5-5.0	36.025	37.025
Astra Tech Osseospeed RP 3.5-4.0	36.024	37.024
Astra Tech EV EV 4.8	36.061	37.061
Astra Tech EV EV 4.2	36.060	37.060
Astra Tech EV EV 3.6	36.059	37.059
3i Osseotite WP 5.0	36.013	37.013
3i Osseotite RP 4.1	36.012	37.012
3i Osseotite NP 3.4	36.011	37.011
3i Certain WP 5.0	36.016	37.016
3i Certain RP 4.1	36.015	37.015
3i Certain NP 3.4	36.014	37.014

2. 原材料

チタン合金（TiAl6V4）

3. 包装

チタンベース、スクリュー 各 1 個/ 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 適切な前加工、前処理を行い、作業模型のインプラントラボアナログに付属のスクリューを用いて本品を取り付ける。
- 2) 本品の上に目的に応じた形態のワックスアップを行う。
- 3) 歯科 CAD システムでスキャニングを行い、ワックスアップの形態に応じた素材加工を CAM システムにて行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 過剰な外圧をかけないこと。
- ・ 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。

【使用上の注意】

1. 使用前に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがあるため、使用しないこと。
2. 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。
3. 回転防止対策による加工は強度減少の恐れがあるため、最小限の加工にとどめること。
4. マージンカラー部を大きくはみ出したり、カラー部基底面より下方に位置するワックスアップは行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 2) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Terrats Medical, S.L. （テラッツ メディカル社）
製造国：スペイン