

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000
フレキシブルコントラスター

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は以下のとおり。



前歯用



咬合面用

2. 原材料

ステンレススチール、シリカゲルコーティング

3. 包装

1個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧接のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みであるか確認すること。
(オートクレーブ滅菌温度、134℃以下厳守。乾燥工程不可。)
- 2) 患者の口腔内にフィットするよう、本品を变形させる。
- 3) 口腔内にセットし、歯の観察または撮影を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 劣化や異常がみられた場合は、使用を中止すること。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. 素材のステンレススチールは鉄に対してさび難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
5. 患者の嘔吐反射をもたらし恐れがあるため、印象採得中は患者の状態に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中は破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

2. 滅菌

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。

【オートクレーブ滅菌温度、134℃以下厳守。乾燥工程不可。】

3. その他

洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。

4. 使用前使用後に破損、キズ等がないか確認し、これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.

（ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラタス社）

製造国：中華人民共和国