

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 JMDN コード：70914000

BioMed クリアレジン

【禁忌・禁止】

1. 本品で作製したスプリントは、口腔内において 30 日を超えて使用しないこと。
2. 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、痺れ等の過敏症状の既往歴がある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：液状
色調：透明な薄紫
2. 原材料
エトキシ化ビスフェノール A ジメタクリレート、
ウレタンジメタクリレート、他
3. 包装
1L / カートリッジ

【使用目的又は効果】

本品は、使用期間が 30 日間を超えない歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。

【使用方法等】

- 〔使用方法〕
- 1) 本品をよく振り、本体にセットする。
 - 2) 3D プリンターの取扱説明書に従い、造形を開始する。
 - 3) 造形完了後に取り出す。
 - 4) 造形物を IPA（イソプロピルアルコール）に浸け、15 分間洗浄し余分なレジンを取り除く。※専用の自動洗浄装置「Form Wash」使用を推奨する。その後、新しい IPA（イソプロピルアルコール）に 5 分間浸す。
 - 5) 造形物を乾燥させる。
 - 6) 専用ポストキュア装置「Form Cure」（別売）を使用し、60℃で 60 分間の二次硬化作業を行う。
 - 7) サポート部を取り除く。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、痺れ等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
2. 使用の際は、手袋（ニトリルグローブ等）及び保護眼鏡を着用すること。
3. 火気の近くで使用しないこと。
4. 換気の良い場所で使用すること。
5. 他の製品と併用しないこと。
6. 本品が皮膚に付着した場合には、すぐに石鹸と水で洗い流すこと。
7. 本品が眼に入った場合は、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
8. 使用する場所に、消火器具を備えておくこと。
9. 樹脂が入った容器は、常にキャップを閉めた状態にすること。
10. 樹脂が入っている容器は、中の成分が分離しないように定期的に振ること。
11. 樹脂タンクに残った液状の樹脂は元のボトルまたはカートリッジには戻さず、そのままタンク内に残しておくこと。
12. 樹脂タンクを樹脂が入ったまま、プリンターから取り外し、単体で保管する場合は、光や熱に晒されないようにタンクの蓋を必ず閉めておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温、直射日光を避け、5～30℃で保管すること。
- 2) 火気を避けて保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Formlabs, Inc.（フォームラブズ社）
製造国：アメリカ