

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

Ci 布バフ

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料

綿

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 歯科技工用電気レーズ等の回転器具に取り付ける。
- 2) 研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。

※最大回転数：3,500rpm

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ 研磨を行う際は、保護眼鏡、防塵マスク等を使用すること。
- ・ 本材を回転器具に取り付ける際は、回転器具のメーカー指示に従って確実に装着すること。
- ・ 使用の際は必ず研磨材を使用すること。

【使用上の注意】

1. 破損、変形等のあるものは使用しないこと。
2. 本品に対して、形状変更等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学薬品を避け、水のかからない場所で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地