

**2025 年 1 月改訂（第 3 版）
* 2024 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001681

機械器具（34）医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル JMDN コード：12235000

メスハンドル KR

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けて用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守）
- 2) 本品にブレード（別売）を取り付け使用する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、ニッケル及びクロムを含有するため、これらの成分に対し、湿疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある者には使用しないこと。
- 2) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 5) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌上について
[洗浄]
・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
[滅菌]
・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Kohler Medizintechnik GmbH
（コーラー メディツインテック社）

製造国：ドイツ