

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN コード：35531000

再使用禁止

Ci SMS ドレープ

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

寸法（60×60 cm、90×90 cm等）、穴又はスリットの形状、粘着テープやパウチの有無により異なる種類がある。

2. 原材料

ポリプロピレン SMS 不織布

テープ部：感圧接着剤（PSA）、PET フィルム

3. 包装

1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、術部を隔離し清潔に保つために用いる。また、患者を保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷又は水漏れがないことを確認する。
- 2) 滅菌包装を開封し、無滅菌的に取り出す。
- 3) 使用目的の部位・場所を消毒し、術部周辺を覆う。

【使用上の注意】

1. 包装の破損や製品の異常が認められた場合は、使用しないこと。
2. 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
3. 粘着テープをはがす際は、皮膚に負担をかけないようにゆっくりとはがすこと。
4. 本品の使用により皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し適切な処置をすること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光、水漏れ、高温、多湿の環境を避け、涼しい場所で保管すること。

〔有効期間〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）