

**2024 年 1 月改訂(第 3 版)

* 2022 年 11 月改訂(第 2 版)

届出番号 : 17B2X10001001697

歯科材料 (07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード : 16189000

CAD・CAM ワックスエコ BK

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

《ユニバーサルタイプ》

外径 : 98 mm

厚み : 10 mm、12 mm、14 mm、16 mm、18 mm、20 mm、25 mm

色調 : グレー

《DWX-4 タイプ》

寸法 : 76 mm×38 mm×16 mm

色調 : グレー

2. 原材料

パラフィン

3. 包装

ユニバーサルタイプ : 1 個 / 包

DWX-4 タイプ : 3 個 / 包

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 直射日光を避け、5～30℃の乾燥した場所で保管すること。
- 2) 火気の近くに保管しないこと。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル

住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI
(ビルキム ティビ ウルンラー社)

製造国 : トルコ共和国

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製用に用いる。

【使用方法等】

- 1) CAD/CAM 加工器に装着し、本品を切削加工する。
- 2) 必要に応じてマージンの調整を行う。
- 3) 通法に従い、埋没、鑄造を行う。

【使用上の注意】

1. 本品は可燃性であるため、使用の際は火傷をしないように注意すること。
2. 本品を切削・研磨する際は、保護眼鏡、マスク等を使用すること。
3. クリストバライト系埋没材など急速加熱系埋没材を使用する場合は、各埋没材の使用書に従うこと。