

再使用禁止

DESS AURUM ベーススクリュー

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 口腔内で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

タイプ	型番
Multi-Unit RP	19.306
Multi-Unit WP	19.331
Nobel Branemark NP	19.401
3i Osseotite NP、RP、WP / Nobel Branemark RP	19.402
Nobel Replace Select NP	19.404
Nobel Replace Select RP、WP / Dentium Superline	19.405
Zimmer Screw-Vent NP、RP、WP	19.417
Astra Tech Osseospeed WP 4.5-5.0	19.425
3i Certain NP、RP、WP / Xive NP、RP、WP	19.438
Nobel Active NP / Straumann BLX / Astra Tech EV 3.6 / Astra Tech Osseospeed RP	19.441
Nobel Active RP	19.442
Straumann Bone Level NP NC、RP RC	19.443
Camlog 3.8、4.3 / Osstem TS Mini	19.444
Straumann Tissue Level RN、WN	19.446
Astra Tech EV 4.2 / MEGAGEN AnyRidge	19.460
Astra Tech EV 4.8 / Osstem TS STD Regular	19.461
Conelog NP、RP	19.474
Conelog WP	19.476

2. 原材料

チタン合金 (Ti-6Al-4V)

3. 包装

1個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

- 適切な前加工、前処理を行った作業模型のインプラントラボアナログに、DESS AURUM ベース（別売）を、本品を用いて固定する。
- 目的に応じた形態のワックスアップを行う。
- 歯科 CAD システムでスキャニングを行い、ワックスアップの形態に応じた素材加工を CAM システムにて行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。（著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。）
- 本品でフィクスチャーアナログに固定する際、手締めにより固定し、3N・cm 以上の締付トルクを加えないこと。

【使用上の注意】

- 本品は指定のベースを使用すること。
- 使用前に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがあるため、使用しないこと。
- 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Terrats Medical, S.L.（テラッツメディカル社）
製造国：スペイン