

再使用禁止

Demi プロフィーカップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
以下のとおり
【カップタイプ】

形状				
種類	ソフト	レギュラー	ソフト	レギュラー
色調	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー
軸部	スクリュー		CA 用	

【ポイントタイプ】

形状				
種類	ソフト	レギュラー	ソフト	レギュラー
色調	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー
軸部	スクリュー		CA 用	

2. 原材料
軸部：真鍮（ニッケルコーティング）
作業部：シリコン樹脂

3. 包装
100 本 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) CA 用を使用する際は、歯科用ハンドピースに直接取り付け
る。スクリュータイプは、ハンドピースに直接取り付ける
か、若しくは別売のマンドレルに装着後、歯科用ハンドピ
ースに取り付ける。
- 3) 研磨ペーストを必要に応じて本品に適量塗布する。
- 4) 本品を歯に軽く押しつけて研磨する。
※推奨回転数（スクリュータイプ）：800～2,000rpm
※最大回転数：10,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 最大回転数（10,000rpm）を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆び、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは
使用しないこと。
- 3) あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがな
いことを確認してから使用すること。
- 4) 使用前に試運転を行い、触れないことを確認すること。
- 5) 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、軸部を確実に
奥まで挿入したことを確認してから使用すること。
- 6) ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあ
るので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 7) 安全のため、保護眼鏡などを使用すること。
- 8) スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れて
しまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はし
ないこと。

【使用上の注意】

- 1) ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のあ
る患者には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーテ
ィングを行うことは破損の原因となるため、絶対に行わない
こと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置等には使用しないこ
と。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管す
ること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

販売業者：株式会社 デミライン
住所：東京都港区海岸 1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 21F
電話番号：050-3537-6480