

ファインエアー300

再使用禁止（ディスポーザブルスリーブ）

【警告】


1. 交差感染を防ぐため、必ず専用のディスポーザブルスリーブを取り付けて使用すること。
2. 使用中、患者が本品を強く噛まないように注意すること。

【禁忌・禁止】

1. 本品は電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、使用時は電波を発する電気機器の電源を切ること。
2. ペースメーカーを装着している患者、または術者には、使用しないこと。
3. ディスポーザブルスリーブは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

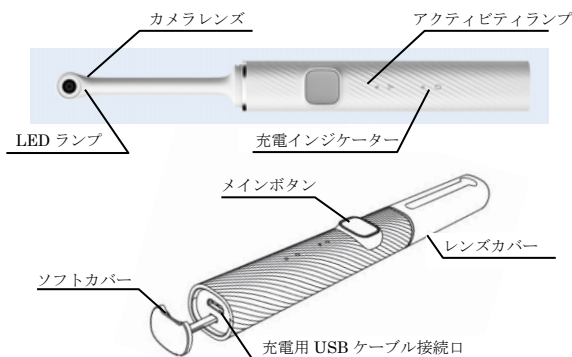

2. 仕様

寸法	210.5mm (H) × 22mm (W) × 19mm (D)
ヘッドサイズ	6mm (H) × 6mm (W) × 3.9mm (D)
画素数	300 万画素数
フレームレート	20fps
F 値	2.8
画角	90°
焦点距離	11～40mm
光源	LED 8 基
水の有害な侵入に対する保護の程度	IP67
対応 OS	iOS/Android

3. 包装

1 セット / 包

構成品：本体、ディスポーザブルスリーブ×50 枚、
充電用 USB ケーブル、レンズカバー

【別売品】

- ・ディスポーザブルスリーブ 50 枚 / 包
- ・充電用 USB ケーブル 1 個 / 包
- ・レンズカバー 1 個 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に用いる。

【使用方法等】

【使用前の準備】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 本体底面のソフトカバーを開け、充電用 USB ケーブルを接続口に差込み、充電アダプター（別売）に接続し十分な充電を行う。
初回使用時は、1 時間半以上の充電を行うこと。

2. 取扱説明書に従い、各種端末に専用アプリをインストールする。

【使用方法】

1. 専用アプリを起動する。
2. 本品に専用ディスポーザブルスリーブを取り付ける。
3. アクティビティランプが緑色に点灯するまでメインボタンを長押しし、電源を入れる。
4. アクティビティランプが緑色に点滅すると、撮影が可能となる。
5. 端末上のアイコンを操作する、若しくは本品のメインボタンを押し、撮影を開始する。
6. 撮影終了後、端末上で本品の電源を切る、若しくはメインボタンを長押しし電源を切る。
7. 専用アプリを終了する。
8. 取扱説明書に従い、清掃・消毒・滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌不可）

【使用上の注意】

1. 本品の LED 照明を患者の目に照射しないこと。また、直視しないこと。
2. ディスポーザブルスリーブに破損がないことを確認し、本品に装着した状態で使用すること。
3. 濡れた状態で使用しないこと。
4. 本品は、可燃性ガスのある場所で使用しないこと。
5. 長時間水に浸さないこと。
6. 充電中は電源を切っておくこと。
7. 充電は専用の充電ケーブルを使用し、取扱説明書に従って行うこと。
8. 電磁波を発する機器付近での使用はしないこと。
9. 内蔵のリチウム電池は取り外さないこと。
10. 過放電を防ぐため、使用しない場合でも定期的に充電を行うこと。
11. 超音波による消毒、乾燥滅菌、オートクレーブ滅菌は行わないこと。
12. ディスポーザブルスリーブは再使用不可のため、使用後は国や自治体の規制に従って、適正に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
2. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄・消毒・滅菌】

- ・適正な濃度の消毒用エタノールを含ませた不織布等で汚れをふき取り、水のかからない場所で保管すること。
- ・オートクレーブ滅菌不可。

【点検】

- ・使用前に、汚れや破損、動作確認を行うこと。
- ・異常が認められた場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800製造業者：Shanghai Minimiror Medical Instrument Co., Ltd.
(シャanghai ミニミラー メディカル インストルメント社)

製造国：中華人民共和国